



1

Place item in pouch.
Colocar dentro de la bolsa.
Placer l'article dans le sachet.
Artikel in den Beutel legen.
Inserire l'oggetto nella busta.

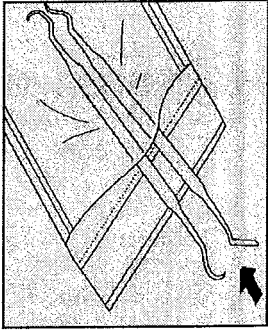


2

Peel off protective strip from adhesive band.
Quitar la tira protectora de la banda adhesiva.
Retirer le film protecteur de la bande adhésive.
Den Schutzstreifen vom Kleband entfernt.
Togliere la striscia protettiva dalla banda adesiva.

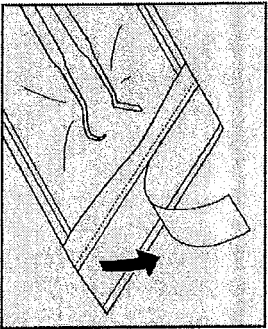

3

Fold over paper flap along fold and press down firmly from the center outward.
Dobrar la alita de papel por el pliegue y apretar firmemente desde el Centro hacia afuera.
Plier le rabat de papier le long du pli et presser fermement à partir du centre vers l'extérieur.
Die Papierklappe an der Falzlinie umfallen und von der Mitte nach außen hin fest andrücken.
Fiepare la banda adesiva lungo la linea tratteggiata premendo con decisione dal centro verso l'esterno.

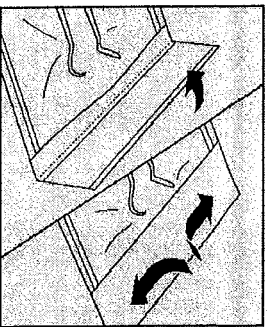

The top indicator will change color when steam or chemical vapor processed.

La parte supérieure de l'indicateur de stérilisateur changera de couleur à la vapeur de vapeur ou chimique.

Die obere Indikator wechselt nach der Dampfsterilisation oder Chemikaldampferfarbung.

Il set superiore cambia colore quando è stato effettuato il processo di sterilizzazione a vapore o chimica.

The bottom indicator will change color when ethylene oxide processed.

La parte inférieure change de couleur lors du traitement par oxyde d'éthylène.

Die untere Indikator wechselt nach der Sterilisation mit Ethylenoxid-Farbung.

La parte inferiore cambia colore quando il processo di sterilizzazione a ossido di etilene è stato effettuato.